

PASO 3. Conecte los cables conductores y encienda el generador de señales. Consulte los pasos 6-7 del manual de aplicación de Eagle OA para finalizar la aplicación de la envoltura Night-Wrap.

PASOS PARA QUITARSE EL SISTEMA BIONICARE

PASO 1. Quite la rodillera de la pierna y despegue cuidadosamente los electrodos de la rodilla y el muslo. Los electrodos deben adherirse al forro y la envoltura de rodilla.

PASO 2. Coloque el protector de plástico transparente en los electrodos de rodilla y muslo para cubrirlos cuando no los esté usando.

NOTA: No es necesario que retire los electrodos de la envoltura Night-Wrap al quitársela. Deje los electrodos en su sitio y cúbralos con el protector transparente para mantenerlos limpios e impedir que se sequen prematuramente.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LOS ELECTRODOS Y LA ENVOLTURA NIGHT-WRAP

- No utilice alcohol para limpiar la superficie de la piel.
- Los electrodos deben aplicarse únicamente en superficies cutáneas secas, limpias y sin lesiones. Antes de aplicar la envoltura Night-Wrap, lávese la piel con agua y jabón y séquesela por completo.
- No aplique lociones en la piel antes de aplicar la envoltura Night-Wrap o la envoltura de rodilla.
- No recorte los electrodos, ya que los bordes cortados podrían dar lugar a una distribución desigual de la estimulación.
- Quítese la envoltura Night-Wrap y los electrodos antes de ducharse.
- Si tiene síntomas de irritación cutánea al utilizar el sistema BioniCare, deje de usarlo inmediatamente y llame al departamento de Atención al Paciente de VQ OrthoCare al 1.800.452.7993, o consulte con su profesional médico.

ENVOLTURA NIGHT-WRAP Y FORROS EAGLE OA

Para limpiar la envoltura Night-Wrap y los forros, primero debe quitar los electrodos. La envoltura Night-Wrap y los forros deben lavarse a mano con agua fría y detergente suave. Lávelos a fondo y séquelos al aire (no los ponga en la secadora). No los lave nunca en lavadora ni blanqueadores de lejía, suavizantes de telas o detergentes fuertes.

ATENCIÓN: Los electrodos se deben desechar y cambiar si están dañados o cuando ya no puedan adherirse bien a la piel, si se ha separado el gel o si se percibe un cambio en la intensidad de estimulación. Si tiene dudas respecto a la integridad o al funcionamiento correcto de algún electrodo, cámbielo antes de realizar el tratamiento. **Si toma analgésicos y/o usa otros dispositivos de control del dolor, proceda con cautela al aumentar la amplitud del dispositivo BioniCare.**

ADVERTENCIAS: Este producto está diseñado para ser empleado exclusivamente con electrodos aprobados para la estimulación eléctrica con fines médicos.

PARA USO EN UN SOLO PACIENTE.

ATENCIÓN: Las leyes federales permiten la venta o prescripción de este dispositivo únicamente a profesionales certificados por las leyes del Estado en el cual ejercen para usar u ordenar el uso del dispositivo.

GARANTÍA: VQ OrthoCare garantiza todos sus productos a partir de la fecha de compra original contra defectos en cuanto a material y mano de obra. El desgaste y deterioro normales que se producen durante el uso de un producto no están considerados como defectos. Comuníquese con VQ OrthoCare al 800.266.6969 para averiguar detalles específicos sobre la garantía del producto.



18011 Mitchell South ■ Irvine, CA 92614
800.266.6969 ■ www.vqorthocare.com



EMERGO EUROPE
Molenstraat 15
2513 BH, La Haya
Países Bajos
Teléfono: +31.70.345.8570
Fax: +31.70.345.7299



SISTEMA PARA RODILLA EAGLE OA™ BIONICARE

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN



EAGLE OA™



ENVOLTURA
NOCTURNA
NIGHT-WRAP

MANUAL DE APLICACIÓN DEL SISTEMA EAGLE OA BIONICARE

PASO 1. Fije la envoltura de rodilla a la rodillera.

La parte anterior de la envoltura de rodilla tiene una etiqueta puesta.

Con la parte anterior de la rodillera y de la envoltura de rodilla enfrente suyo, coloque un asa de la envoltura de rodilla sobre la copa condilar plástica de la rodillera, como se muestra.

Tire de la envoltura de rodilla haciéndola pasar por detrás de la rodillera y alrededor del exterior de la otra bisagra. Fije el asa restante alrededor de la copa condilar plástica.



NOTA: El lado de la etiqueta debe quedar orientado hacia la parte anterior de la rodillera.

PASO 2. Sustituya los forros del muslo por el forro BioniCare.

Instale el forro BioniCare en la misma posición que los forros laterales originales, con el manguito para el muslo como se muestra en el PASO 3. La zona saliente blanda del forro debe quedar orientada hacia la piel.



PASO 3. Instale el electrodo del muslo.

Retire el protector blanco del electrodo del muslo. Adhiera el electrodo al forro del muslo, centrándolo tal como se muestra. El cable del electrodo debe quedar en la parte superior de la rodillera.



PASO 4. Instale el electrodo de rodilla.

Coloque temporalmente la rodillera al revés sobre la pierna, de modo que el centro de la envoltura de rodilla esté sobre el centro de la rótula. Las bisagras deben quedar en los lados de la rodilla.

Retire el protector blanco del electrodo de rodilla y adhíralo a la envoltura de rodilla como se muestra, con el cable extendiéndose hacia abajo.



PASO 5. Aplique la rodillera (vea las instrucciones de aplicación del Eagle OA) Retire el protector transparente de ambos electrodos. Con la rodilla flexionada formando un ángulo de 45 grados, empuje suavemente la envoltura sobre la rodilla a fin de crear una “burbuja invertida”. Asegúrese de que el centro de la envoltura de rodilla y la parte redonda central del electrodo estén situados directamente sobre la rótula.

Abroche las bandas en orden numérico y siga aplicándose la rodillera según las instrucciones de aplicación de Eagle OA.



PASO 6. Conecte los cables conductores. Conecte el cable del electrodo rojo (rodilla) a la punta roja del cable conductor y el cable del electrodo negro (muslo) a la punta negra del cable conductor. Enchufe el otro extremo del cable conductor en el generador de señales.

PASO 7. Encienda el generador de señales y desbloquéelo. Oprima el botón de inicio y luego el botón de aumento del voltaje, hasta sentir una sensación de hormigueo. A continuación oprima el botón de disminución del voltaje hasta que deje de sentir el hormigueo. El tiempo recomendado de tratamiento es de 6 a 10 horas como mínimo, pero usted puede prolongarlo para obtener resultados más rápidos.





Botones de aumento y disminución del voltaje

MANUAL DE APLICACIÓN DEL SISTEMA BIONICARE NIGHT-WRAP


PASO 1. Instale los electrodos en la envoltura nocturna BioniCare Night-Wrap.

Coloque la envoltura Night-Wrap sobre la pierna con la banda más larga más cerca de la cintura, de modo que se vean los gráficos de la envoltura. Cerciórese de que la rótula esté centrada debajo de la marca correspondiente.

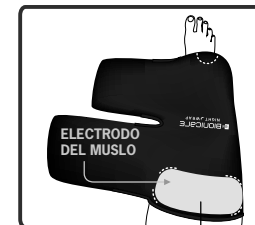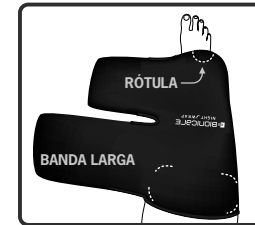

Aplique el electrodo del muslo despegando el protector de papel blanco y adhiriendo el electrodo a la envoltura sin sobrepasar las marcas. El cable debe extenderse hacia arriba en dirección de la cintura.

Aplique el electrodo de rodilla. Para ello, despegue el protector de papel blanco y adhiera el electrodo a la envoltura sin sobrepasar las marcas, como se ilustra. El cable debe extenderse hacia abajo.

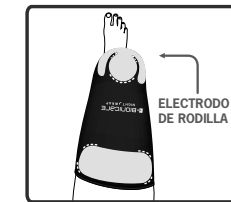

PASO 2. Aplique la envoltura BioniCare Night-Wrap.

Retire el protector transparente de ambos electrodos. Sitúe la envoltura de modo que los electrodos queden orientados hacia la pierna (mantenga la banda larga más cerca de la cintura).

Centre la zona redonda pequeña del electrodo sobre la rodilla y empuje suavemente el electrodo de rodilla contra ésta mientras mantiene alejada de la pierna la parte de la envoltura que se fija al muslo.

Mientras sujeta el borde superior de la envoltura, ténsela suavemente y luego adhiera el electrodo del muslo a la piel.

Enrolle las bandas alrededor de la pierna y fije las tiras de ganchos a la envoltura. Las bandas se pueden recortar según la necesidad. Se logra un rendimiento óptimo cuando la banda inferior pasa por encima de la rótula y ésta queda envuelta en dos capas.

