

Bisagra de amplitud de movimiento

1. Saque ambas tapas de la bisagra moviendo hacia arriba la lengüeta pequeña.



2. Coloque ambas clavijas de extensión en el mismo grado.



3. Coloque ambas clavijas de flexión en el mismo grado.

4. Repita el procedimiento en la bisagra opuesta. Asegúrese de colocar todas las clavijas de extensión y flexión en el mismo grado que la primera bisagra.

5. Vuelva a poner ambas tapas en las bisagras.

Cuidado y mantenimiento

El agua salada, la arena, la suciedad y otros elementos pueden dañar este dispositivo. Después de su exposición a dichos elementos, enjuáguelo muy bien en agua dulce. Séquelo con una toalla o déjelo secar al aire.

Los revestimientos deben sacarse y lavarse a mano según sea necesario, con agua fría y detergente suave; enjuáguelos bien y séquelos al aire (no los ponga en la secadora). Lubrique las bisagras rociándolas con silicone según sea necesario.

Indicaciones

- Posterior a la cirugía de rodilla o postraumatismo
- Manejo conservador de lesión ligamentosa aislada que requiere amplitud de movimiento controlada

ADVERTENCIAS

En caso de sufrir dolor, inflamación, cambios de sensibilidad o cualquier reacción fuera de lo común mientras utiliza este producto, llame al departamento de Atención al Paciente de VQ OrthoCare al **800.452.7993**, o consulte a un médico.

Para uso en un solo paciente.

AVISO: Si bien se ha hecho todo el esfuerzo posible utilizando las técnicas más avanzadas para obtener la máxima compatibilidad entre la funcionalidad, la resistencia, la durabilidad y la comodidad, este dispositivo es sólo una parte del programa general de tratamiento administrado por un profesional médico. No se garantiza que se evitarán lesiones por el uso de este dispositivo.

PRECAUCIÓN: Los reglamentos federales, estatales y/o locales pertinentes podrían imponer que este dispositivo sea vendido o recetado exclusivamente por especialistas con licencia otorgada por el estado donde ejercen su profesión.

GARANTÍA: VQ OrthoCare garantiza todos sus productos a partir de la fecha de compra original contra defectos en cuanto a material y mano de obra. El desgaste y deterioro normales que se producen durante el uso de un producto no están considerados como defectos. Comuníquese con VQ OrthoCare al **800.266.6969** para averiguar detalles específicos sobre la garantía del producto.



18011 Mitchell South, Irvine, CA 92614
800.266.6969
www.vqorthocare.com
customerservice@vqorthocare.com

Modo de empleo

Complite™ y Coolite™
Rodilleras después de la cirugía



Instrucciones de aplicación para el paciente


Rodilleras postquirúrgicas **Complite y Coolite**

NOTA: En estas instrucciones se supone que un profesional ortopédico ha llevado a cabo la adaptación inicial de esta rodillera a la medida de la pierna, y que las longitudes de las bandas se han ajustado según la necesidad.

En caso de que esto no sea así, comuníquese con su proveedor de ortosis.

Retirada y reaplicación

1. Para quitar el dispositivo, suelte las bandas y abra los cierres de la envoltura.

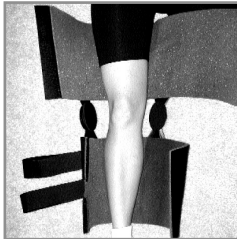

2. Para volver a aplicarlo, coloque las envolturas alrededor de la pierna, con los centros de bisagra alineados con la rótula. Cierre las envolturas al frente de la pierna. Fije primero la banda inferior y continúe sujetando las bandas en dirección ascendente.



Instrucciones de aplicación para el proveedor

Complite y Coolite Rodilleras postquirúrgicas


1. Afloje las bandas de cierre por contacto. Saque las envolturas.



2. Aplique las envolturas de la pierna alrededor de la pierna. Coloque los cierres al frente. De ser necesario, se pueden recortar las envolturas.



3. Coloque la pierna entre los soportes verticales, tal como se muestra.

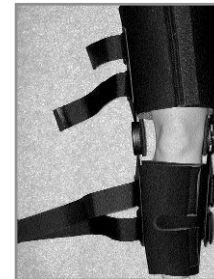

4. Aplique los soportes verticales en posición medial (interior) y lateral (exterior). Alinee las bisagras con el centro de la rótula.



5. Fije primero la banda distal (inferior) y continúe ajustando las bandas en dirección ascendente. La rodillera debe sentirse cómoda. No apriete demasiado las bandas.

Ajuste de la longitud del brazo de la bisagra

1. Los brazos de la bisagra tienen muescas que facilitan acortar, en caso de que sea necesario.



2. Saque los accesorios de la banda deslizándolos hacia abajo por el brazo de la bisagra.



3. Doble con cuidado el brazo de la bisagra en la lengüeta marcada hasta que haya quitado la longitud sobrante.



4. Vuelva a colocar la tapa de acoplamiento a la banda.

